
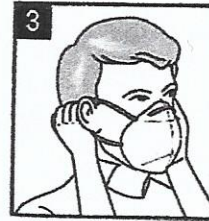


3M

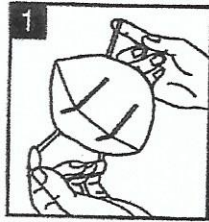

1. Con lo stringinaso rivolto verso l'esterno, tenere gli elastici ad anello con entrambe le mani e con lo stringinaso rivolto verso l'alto.
2. Posizionare il respiratore sotto il mento
3. Portare ogni elastico dietro le orecchie. Aggiustare gli elastici per il massimo comfort possibile
4. Posizionare i polpastrelli di entrambe le mani sullo stringinaso di metallo. Modellare lo stringinaso secondo la forma del setto nasale premendo verso l'interno, mentre si muovono i polpastrelli verso il basso lungo entrambi i lati dello stringinaso. Pinzare lo stringinaso del respiratore utilizzando una sola mano può comportare una tenuta meno efficace del respiratore.
5. L'utilizzatore deve verificare la tenuta al volto del respiratore prima di entrare nell'area di lavoro
 - a) Coprire la parte frontale del respiratore con entrambe le mani, facendo attenzione a non modificare la posizione del respiratore.
 - b) Esalare in modo deciso. Se si percepiscono perdite di aria lungo il setto nasale, riaggiustare lo stringinaso secondo quanto descritto al punto 4. Se si percepiscono perdite di aria lungo il bordo di tenuta, aggiustare gli elastici posteriormente lungo il lato della mano. Se NON si riesce ad ottenere una tenuta ottimale, NON entrare nell'area contaminata. Contattare il proprio supervisore.
 - c) Se non si percepiscono perdite di aria, allora è possibile procedere con l'attività lavorativa.

È estremamente importante premere saldamente lo stringinaso sul setto nasale in modo da ottenere una buona tenuta.

3M China Co. Ltd
222 Tianlin Road
Shanghai China 200233
Tel: 86-21-2210 5335
Fax: 86-21-2210 5035
Website : <http://www.3M.com.cn/PPE>
Made in China

© 3M 2018. Tutti i diritti riservati.
3M è un marchio di 3M Company.